



Eyestil GEL

ES

Gel oftálmico sin conservantes, estéril, transparente
que contiene hialuronato sódico 0.15% y goma xantana 1%

Indicaciones

EYESTIL GEL proporciona alivio de los síntomas de sequedad ocular y alivia las molestias oculares derivadas del uso de lentes de contacto.

EYESTIL GEL también está indicado para el tratamiento de heridas y abrasiones de la superficie ocular causadas por traumatismos o después de cirugías oculares.

Composición

Hialuronato sódico 0.15%, goma xantana 1%, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de calcio dihidrato, disodio fosfato dodecahidrato, fosfato de sodio monobásico monohidratado, citrato de sodio, glicerol, agua purificada.

Presentación

30 envases unidosis sin conservantes de 0,4 ml.
1 instrucción de uso.

Características y mecanismo de acción

EYESTIL GEL contiene dos polímeros naturales, hialuronato sódico y goma xantana. Tras la instilación en el saco conjuntival, **EYESTIL GEL** entra en contacto con las lágrimas y forma una capa transparente, lubricante y viscosa, lo que reduce la fricción debida a los movimientos oculares y al parpadeo.

EYESTIL GEL alivia los síntomas de sequedad ocular debida a factores ambientales y climáticos como polen, polvo, deslumbramiento, contaminación, y el uso de ordenadores.

Asimismo, **EYESTIL GEL** garantiza la protección de la superficie ocular durante el proceso de cicatrización tras heridas o abrasiones. La ausencia de conservantes hace que el producto sea tolerado perfectamente.

Dosis y administración

Instilar 1 gota de **EYESTIL GEL** en el saco conjuntival cuatro veces al día, a menos que su médico indique otra dosis.

Instrucciones de uso

Lavarse/desinfectarse las manos antes de utilizar.

1. Compruebe que el envase unidosis no esté dañado.
2. Separar un envase unidosis de la tira.
3. Sujetar el envase unidosis por la parte inferior y agitar hacia abajo.

4. Abrir dando vueltas a la parte superior y tirar.
5. Instilar **EYESTIL GEL** evitando que el extremo del envase entre en contacto con el ojo o con cualquier otra superficie.



Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Precauciones y advertencias

No utilizar **EYESTIL GEL** si el envase está abierto o dañado.

Evitar que el extremo del envase entre en contacto con el ojo o con cualquier otra superficie. Cada envase unidosis debe utilizarse inmediatamente tras ser abierto.

EYESTIL GEL no contiene conservantes, por lo que una vez abierto el envase, lo que quede de producto debe ser desechado ya que puede contaminarse, exponiendo el ojo al riesgo de infección.

Los envases unidosis deben utilizarse durante las siguientes 12 semanas una vez que se ha abierto el sobre de aluminio.

No use **EYESTIL GEL** si no es transparente.

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

No utilizar **EYESTIL GEL** después de la fecha de caducidad.

No desechar en el medio ambiente después del uso. Para la correcta eliminación del producto, por favor siga las legislaciones locales o nacionales.

La administración de **EYESTIL GEL** a niños o personas con capacidades limitadas debe ser supervisada por un adulto responsable.

Interacciones con otros medicamentos o productos sanitarios para uso ocular

Se desconocen las interacciones con la administración de otros medicamentos oftálmicos. Sin embargo, dadas las propiedades físicas del gel, se aconseja no administrar otros medicamentos o productos sanitarios para uso ocular hasta 60 minutos después de instilar **EYESTIL GEL**.

El uso concomitante de lentes de contacto terapéuticas después de la cirugía de queratectomía fotorrefractiva (PRK) resultó ser

compatibile con el uso del producto.
Sin embargo, se recomienda el uso de otros tipos de lentes de contacto solo 60 minutos después de la aplicación de **EYESTIL GEL**.

Efectos indeseables

El uso del producto puede causar ocasionalmente ligera sensación de ardor o irritación.

Notificación de reacciones adversas:

Cualquier reacción adversa debe ser reportada a las autoridades locales de vigilancia o a:
SIFI S.p.A. – Via Ercole Patti, 36
95025 Aci Sant’Antonio (CT) Italia
e-mail: vigilance@sifigroup.com

**ÚNICAMENTE PARA USO TÓPICO OCULAR.
MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Fabricado por:

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) – ITALIA

EYESTIL GEL es un producto sanitario estéril.

Última revisión del texto: Febrero 2023



N° Patente: EP 1 358 883

Información detallada y actualizada de este producto sanitario se encuentra disponible por escaneo del código QR que aparece en las instrucciones de uso y en el envase con un smartphone. La misma información está disponible en la siguiente dirección:
<https://qr.sifigroup.com/1G809070/>



Simboli - Symboles - Symbols - Símbolos

	Fabbricante - Fabricant Manufacturer - Fabricante
	Marchio CE e codice Organismo Notificato Marquage CE et code organisme notifié CE Mark and Notified Body Code Marcado CE y código del organismo notificado
	Sterilizzato mediante processo asettico sistema di barriera sterile singolo (vials) con imballaggio protettivo esterno (sacchetto) Stérilisé en utilisant une technique aseptique système de barrière stérile unique (flacons) avec emballage protecteur extérieur (sachet) Sterilized using aseptic processing technique – Sterilized by an aseptic process – single sterile barrier system (vials) with protective packaging outside (pouch) Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento aséptico sistema de barrera estéril simple (envases) con embalaje protector exterior (bolsa)
	Numero di lotto - Numéro de lot Batch code - Código de lote
	Mese ed anno di fabbricazione Mois et à l'année de fabrication. Month and year of manufacture Año y mes de la fabricación

	Utilizzare entro AAAA-MM Date de péremption AAAA-MM Use by YYYY-MM Fecha de caducidad AAAA-MM
	Non riutilizzare - Ne pas réutiliser Do not reuse - No reutilizar
	Limite superiore di temperatura 30°C Limite supérieure de température 30°C Upper limit of temperature 30°C Límite superior de temperatura 30°C
	Non utilizzare se il contenitore è danneggiato Ne pas utiliser si le récipient est endommagé Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado
	Dispositivo medico Dispositif médical Medical device Producto sanitario
	Consultare le istruzioni per l'uso Consultez le mode d'emploi Consult instructions for use Consulte las instrucciones de uso
	Identificativo unico del dispositivo Identifiant unique de l'appareil Unique device identifier Identificador único de producto