



Eyestil GEL



Gel oftalmico sterile trasparente senza conservanti
contenente sodio ialuronato 0.15% e xanthan gum 1%

Indicazioni

EYESTIL GEL allevia i sintomi di secchezza dell'occhio di varia natura. È indicato per alleviare i sintomi del discomfort oculare derivato dall'uso delle lenti a contatto.

EYESTIL GEL è inoltre indicato per la medicazione delle ferite e delle abrasioni della superficie oculare causate da eventi traumatici o susseguenti ad interventi chirurgici oculari.

Composizione

Sodio ialuronato 0.15%, xanthan gum 1%, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro biidrato, disodio fosfato dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio citrato, glicerolo, acqua purificata.

Presentazione

30 contenitori monodose senza conservanti da 0,4 ml.
1 foglio illustrativo.

Caratteristiche e meccanismo d'azione

EYESTIL GEL contiene due polimeri naturali: l'acido ialuronico e lo xanthan gum. Applicato nel fornice congiuntivale **EYESTIL GEL** si mescola alla lacrima e forma un bendaggio lubrificante, viscoso e trasparente, riducendo l'attrito causato dai movimenti oculari e dall'ammiccamento.

EYESTIL GEL dà sollievo dai sintomi di secchezza dell'occhio causati da fattori ambientali e climatici quali polline, polvere, abbagliamento, inquinamento, uso di videotermini.

Inoltre **EYESTIL GEL** protegge la superficie dell'occhio durante i processi di riparazione conseguenti a ferite o abrasioni.

L'assenza di conservanti rende il prodotto ben tollerato.

Dosaggio e somministrazione

Si consiglia di somministrare **EYESTIL GEL** nel fornice congiuntivale alla dose di una goccia 4 volte al giorno, salvo diversa indicazione del medico.

Istruzioni per l'uso

Lavare/igienizzare le mani prima dell'uso.

1. Assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto.
2. Staccare la monodose dalla strip.
3. Afferrare il contenitore monodose dalla base e scuotere verso il basso.
4. Aprire ruotando la parte superiore e tirare.

5. Instillare **EYESTIL GEL** evitando che l'estremità del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie.



Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto.

Precauzioni e avvertenze

Non utilizzare **EYESTIL GEL** se il contenitore è aperto o danneggiato.

Non toccare l'estremità del contenitore aperto e non metterla a diretto contatto con l'occhio o altre superfici.

Ciascun contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere utilizzato, poiché **EYESTIL GEL** non contiene conservanti e il prodotto rimanente potrebbe contaminarsi, esponendo al rischio di infezioni oculari.

Dopo l'apertura della bustina i contenitori monodose rimanenti devono essere utilizzati entro 12 settimane.

Non utilizzare **EYESTIL GEL** se non è trasparente.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Non utilizzare **EYESTIL GEL** dopo la data di scadenza.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'uso. Per il corretto smaltimento del prodotto attenersi alle normative nazionali o locali.

La somministrazione di **EYESTIL GEL** a bambini o persone con abilità limitata deve essere effettuata da parte di un adulto responsabile.

Interazioni con altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico

Non sono note interazioni del prodotto con la somministrazione di farmaci per uso oftalmico. Tuttavia, per le proprietà fisiche del gel, si consiglia di non somministrare altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico nei 60 minuti successivi alla somministrazione di **EYESTIL GEL**.

Il prodotto si è dimostrato compatibile con l'impiego contemporaneo di lenti a contatto terapeutiche dopo intervento di chirurgia refrattiva (PRK).

Si sconsiglia l'uso di altri tipi di lenti a contatto se non sono trascorsi 60 minuti dall'applicazione di **EYESTIL GEL**.

Effetti indesiderati

Occasionalmente può manifestarsi bruciore lieve e transitorio.

NOTIFICA DI REAZIONI AVVERSE

Eventuali effetti indesiderati devono essere notificati alle Autorità competenti locali di Vigilanza o a:

SIFI S.p.A., Via Ercole Patti 36
95025 Aci Sant'Antonio (CT) Italia
e-mail: vigilance@sifigroup.com

**PER ESCLUSIVO USO TOPICO OCULARE
TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA
PORTATA DEI BAMBINI**



Fabbrikante

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 – 95025
Aci S. Antonio (CT) - ITALIA

EYESTIL GEL è un Dispositivo medico sterile.

Ultima revisione del testo: Febbraio 2023



BREVETTO NUMERO: EP 1 358 883

Informazioni dettagliate e aggiornate per questo prodotto sono disponibili attraverso la scansione del codice QR, riportato sul confezionamento del prodotto, con uno smartphone. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul seguente URL
<https://qr.sifigroup.com/1G809070/>



Simboli - Symboles - Symbols - Simbolos

	Fabbrikante - Fabricant Manufacturer - Fabricante
	Marchio CE e codice Organismo Notificato Marquage CE et code organisme notifié CE Mark and Notified Body Code Marcado CE y código del organismo notificado
	Sterilizzato mediante processo asettico sistema di barriera sterile singolo (vials) con imballaggio protettivo esterno (sacchetto) Stérilisé en utilisant une technique aseptique système de barrière stérile unique (flacons) avec emballage protecteur extérieur (sachet) Sterilized using aseptic processing technique – Sterilized by an aseptic process – single sterile barrier system (vials) with protective packaging outside (pouch) Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento aséptico sistema de barrera estéril simple (envases) con embalaje protector exterior (bolsa)
	Numero di lotto - Numéro de lot Batch code - Código de lote
	Mese ed anno di fabbricazione Mois et à l'année de fabrication. Month and year of manufacture Año y mes de la fabricación

	Utilizzare entro AAAA-MM Date de péremption AAAA-MM Use by YYYY-MM Fecha de caducidad AAAA-MM
	Non riutilizzare - Ne pas réutiliser Do not reuse - No reutilizar
	Limite superiore di temperatura 30°C Limite supérieure de température 30°C Upper limit of temperature 30°C Límite superior de temperatura 30°C
	Non utilizzare se il contenitore è danneggiato Ne pas utiliser si le récipient est endommagé Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado
	Dispositivo medico Dispositif médical Medical device Producto sanitario
	Consultare le istruzioni per l'uso Consultez le mode d'emploi Consult instructions for use Consulte las instrucciones de uso
	Identificativo unico del dispositivo Identifiant unique de l'appareil Unique device identifier Identificador único de producto