

Lubristil SYNFO



Soluție oftalmică sterilă echilibrată conținând hialuronat de sodiu 0.2%, gumă xantan 0.2%, glicină 0.1% și betaină 0.25%

Indicații

LUBRISTIL SYNFO, datorită componentelor sale, protejează, hidratează și lubrifică suprafața oculară. Este indicat în toate cazurile de disconfort ocular și de uscăciune oculară cauzate, de exemplu, de:

- Sindromul de ochi uscat;
- Chirurgia oculară;
- Reacții alergice;
- Utilizarea cronică de medicamente cu aplicare topică (precum agenți hipotonizanți oculari, picături oftalmice cu conservanți etc.);
- Utilizarea medicamentelor cu administrare sistemică (precum terapia de substituție hormonală, antihipertensive, antidepressiv, antihistaminice etc.);
- Menopauză;
- Îmbătrânire;
- Stres legat de factorii de mediu (poluare, aer condiționat, fum, vânt etc.);
- Utilizarea îndelungată a dispozitivelor electronice (computer, tabletă, telefon);
- Utilizarea lentilelor de contact.

Produsul nu conține conservanți, putând fi astfel folosit și de către purtătorii de lentile de contact.

Utilizatori propuși

LUBRISTIL SYNFO este o soluție oftalmică sterilă destinată utilizatorilor cu disconfort ocular, iritație sau uscăciune datorate alterărilor calitativ-cantitative ale filmului lacrimal sau cauzate de factori de mediu, de utilizarea monitorelor de calculator sau de utilizarea lentilelor de contact.

Compoziție

Hialuronat de sodiu 0.2%, gumă xantan 0.2%, glicină 0.1%, betaină 0.25%, tampon Tris-HCl, clorură de sodiu, apă purificată.

Fără conservanți.

Fără fosfați.

Forma de prezentare

1 flacon de 10 ml. 1 prospect.

Caracteristici și mecanism de acțiune

LUBRISTIL SYNFO conține doi polimeri naturali, hialuronatul de sodiu și guma xantan, cu proprietăți lubrifiante, hidratante și mucomimetice. Efectele reepitelizante și antioxidante ale ambelor componente sunt augmentate de acțiunea lor sinergică.

LUBRISTIL SYNFO conține, de asemenea, glicină și betaină, substanțe cu acțiune osmoprotectoare, care favorizează menținerea homeostaziei celulare care, de obicei, este alterată în cazurile de uscăciune oculară. Glicina și betaina joacă un rol în faza de

remodelare a epitelului ocular din timpul proceselor de vindecare, acționând ca osmoprotectori asupra celulelor expuse stresului hiperosmotic.

Datorită combinației de hialuronat de sodiu, gumă xantan și osmoprotectori, **LUBRISTIL SYNFO** hidratează, lubrifică și repară suprafața oculară, contribuind la refacerea homeostaziei și protejând-o împotriva leziunilor oxidative.

LUBRISTIL SYNFO garantează, de asemenea, o senzație îndelungată de calmare și confort maxim pentru perioada de utilizare a produsului.


Doze și mod de administrare

Instilați o picătură de **LUBRISTIL SYNFO** în sacul conjunctival de patru ori pe zi sau la nevoie.

Instrucțiuni de utilizare

Spălați-vă/igienizați-vă mâinile cu atenție înainte de utilizare.

1. Asigurați-vă că capacul de protecție este intact înainte de utilizare.
2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați sigiliul de siguranță al capacului de protecție trăgând marginea benzii în sens invers acelor de ceasornic.

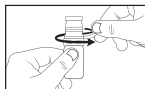

3. Îndepărtați capacul de protecție trăgându-l în sus.




Nu exercitați nicio presiune asupra flaconului înainte de a îndepărta capacul de protecție și înainte de a întoarce flaconul cu susul în jos pentru administrare. Acest lucru ar duce la deformarea ireversibilă a flaconului.

4. Întoarceți flaconul și instilați câte o picătură de **LUBRISTIL SYNFO** în fiecare ochi, exercitând o ușoară presiune asupra flaconului, având grijă să nu atingeți ochiul, pleoapa sau orice altă suprafață cu vârful flaconului. În acest fel poate fi evitată orice contaminare.




Datorită caracteristicilor intrinseci ale flaconului cu dozator pentru soluții fără conservanți, pe măsură ce produsul este utilizat treptat, poate fi necesar să se exercite o presiune mai mare pentru a permite scurgerea picăturilor.

5. Scuturați flaconul în jos pentru a elimina orice soluție reziduală prezentă pe vârful picurătorului.

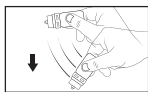

6. Închideți flaconul cu capacul de protecție imediat după utilizare.

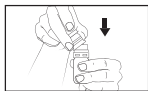

Nu uitați să notați pe cutia de carton data primei deschideri a flaconului. Produsul trebuie utilizat în termen de 6 luni de la prima deschidere a flaconului.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la unul dintre componente.

Precauții și avertizări

 Nu utilizați **LUBRISTIL SYNFO** dacă flaconul este deschis sau deteriorat.

În timpul aplicării asigurați-vă că vârful picurător nu intră în contact cu ochii, cu pleoapele sau cu alte suprafețe.

A se păstra la o temperatură nu mai mare de **25 °C**.

Nu utilizați **LUBRISTIL SYNFO** după data de expirare.

Nu aruncați produsul în mediul înconjurător după utilizare. Pentru eliminarea corectă a produsului, vă rugăm să respectați reglementările naționale sau locale.

Administrarea **LUBRISTIL SYNFO** la copii sau la persoane cu abilități limitate trebuie supravegheată de un adult responsabil.

Interacțiuni cu alte medicamente sau dispozitive medicale pentru uz ocular

Nu se cunosc interacțiunile produsului cu administrarea altor medicamente pentru uz ocular; ca urmare, este recomandată evitarea utilizării altor produse medicamentoase sau dispozitive medicale pentru uz ocular mai repede de 10 minute de la administrarea **LUBRISTIL SYNFO**.

Nu este necesară scoaterea lentilelor de contact înainte de administrarea **LUBRISTIL SYNFO** întrucât produsul nu alterează caracteristicile fizice, inclusiv transparența, ale celor mai obișnuite lentile de contact moi, semirigide, sau rigide.

Efecte nedorite

Utilizarea produsului poate cauza, ocazional, o ușoară arsură sau iritație.

În cazul apariției uneia dintre aceste reacții întrerupeți utilizarea produsului.

Notificarea reacțiilor adverse

Orice reacție adversă trebuie raportată autorităților locale de siguranță sau la:

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 - 95025
Aci Sant'Antonio (CT) Italia.
e-mail: vigilance@sifigroup.com

DOAR PENTRU UZ OCULAR TOPIC NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA ȘI LA VEDEREA COPILOR

Producător

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) - ITALY

Distribuit de: S.C. OFTAFARMA ROMANIA SRL, Str. Carol Davila, nr. 105 – 107, et.2, ap. 5, Sector 5, București. Tel. 021.314.28.95.

Ultima revizuire a
textului: decembrie
2025

LUBRISTIL SYNFO este
un dispozitiv medical steril.

CE 0426

**Informații detaliate
și actualizate despre
acest dispozitiv medical sunt disponibile prin
scanarea cu un smartphone a codului QR care
apare în instrucțiunile de utilizare și pe cutia
de carton. Aceleași informații sunt disponibile
la următoarea adresă URL:
<http://qr.sifigroup.com/1G402770/>**



	Producător
CE 0426	Marca CE și codul Organismului Notifica
	Distribuit de, dacă se aplică
STERILE A	Sterilizat printr-o tehnică de procesare aseptică
LOT	Lot nr.
	Luna și anul producției
	Data expirării, AAAA-LL
	A se păstra la temperaturi sub 25°C
	Nu utilizați produsul dacă recipientul este deschis sau deteriorat
MD	Dispozitiv medical
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	cod QR, dacă este prevăzut
UDI	identificator unic de dispozitiv

1G402770R1

SIFI
FAES FARMA
GROUP