



Eyestil **SYNFO**



Solution ophtalmique équilibrée stérile contenant du hyaluronate de sodium 0.2%, de la gomme de xanthane 0.2%, de la glycine 0.1% et de la bétaine 0.25%

Indications

EYESTIL SYNFO protège, hydrate et lubrifie la surface oculaire grâce à ses composants. Il est indiqué dans tous les cas d'inconfort oculaire et de sécheresse oculaire causée, par exemple, par :

- Syndrome des yeux secs ;
- Chirurgie oculaire ;
- Réaction allergique ;
- Utilisation chronique de médicaments topiques (agents hypotonisants oculaires, gouttes ophtalmiques avec des conservateurs, etc.) ;
- Utilisation de médicaments par voie générale (par exemple : hormonothérapie substitutive, antihypertenseurs, antidépresseurs, antihistaminiques, etc.) ;
- Ménopause ;
- Vieillesse ;
- Stress environnemental (pollution, climatisation, fumée, vent, etc.) ;
- Utilisation prolongée d'appareils électroniques (ordinateur, tablette, smartphone) ;
- Utilisation de lentilles de contact.

Le produit est sans conservateur, donc il peut également être utilisé par les porteurs de lentilles de contact.

Pour les utilisateurs

EYESTIL SYNFO est une solution ophtalmique stérile destinée à être utilisée par les utilisateurs présentant une gêne, une irritation ou une sécheresse oculaire dues à des altérations qualitatives et quantitatives du film lacrymal ou causées par des facteurs environnementaux, l'utilisation d'écrans d'ordinateur ou l'utilisation de lentilles de contact.

Composition

Hyaluronate de sodium 0.2%, gomme de xanthane 0.2%, glycine 0.1%, bétaine 0.25%, tampon Tris-HCl, chlorure de sodium, eau purifiée.

Sans conservateur.

Sans phosphate.

Présentation

Flacon de 10 ml. 1 notice.

Caractéristiques et mécanisme d'action

EYESTIL SYNFO contient deux polymères naturels, le hyaluronate de sodium et la gomme xanthane aux propriétés lubrifiantes, hydratantes et muco-mimétiques. L'action synergique de ces deux composants augmente leur activité antioxydante et de ré-épithélialisation.

EYESTIL SYNFO contient également de la glycine et de la bétaine, substances qui agissent comme osmoprotecteurs, c'est-à-dire qui favorisent le maintien de l'homéostasie cellulaire qui est altérée en cas de sécheresse oculaire. La glycine et la

bétaine jouent un rôle dans la phase de remodelage de l'épithélium oculaire lors du processus de cicatrisation de la lésion, agissant comme osmoprotecteurs dans les cellules exposées au stress hyperosmotique.

Grâce à la combinaison du hyaluronate de sodium, de la gomme xanthane et des osmoprotecteurs,

EYESTIL SYNFO hydrate, lubrifie et répare la surface oculaire, contribuant ainsi à restaurer son homéostasie et à la protéger des dommages oxydatifs.

EYESTIL SYNFO procure également un soulagement durable et un confort maximal pendant la période d'utilisation du produit.


Dosage et administration

Instillez 1 goutte de **EYESTIL SYNFO** quatre fois par jour dans le sac conjonctival ou selon le besoin.


Instructions d'utilisation

Laver / désinfecter les mains soigneusement avant utilisation.

1. S'assurer que le bouchon de protection est intact avant utilisation.
2. Avant la première application, retirer le témoin d'intégrité du bouchon en tirant le bord de la languette dans le sens antihoraire.

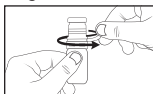

3. Retirer le capuchon de protection en le tirant vers le haut.

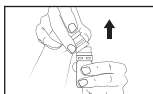

Ne pas exercer de pression sur le flacon avant de retirer le capuchon protecteur et de retourner le flacon pour administration. Cela entraînerait une déformation irréversible du flacon.


4. Inverser le flacon et instiller 1 goutte de **EYESTIL SYNFO** dans chaque œil en exerçant une légère pression sur le flacon lui-même, en prenant soin de ne pas toucher l'œil, la paupière ou toute autre surface avec la pointe du flacon. De cette façon, toute contamination peut être évitée.



En raison des caractéristiques intrinsèques du flacon avec distributeur de solution sans conservateur, au fur et à mesure que le produit

est utilisé, il peut être nécessaire d'exercer une pression plus importante pour permettre aux gouttes de s'écouler.

5. Secouer le flacon tête en bas pour éliminer les gouttes résiduelles sur le compte-gouttes.

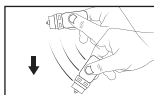

6. Fermer le flacon avec le bouchon de protection immédiatement après l'utilisation.



N'oubliez pas d'inscrire sur la boîte de carton la date de la première ouverture du flacon.

Le produit doit être utilisé dans les 6 mois suivant la première ouverture du flacon.

Contre-indications :

Hypersensibilité à l'un des composants.

Précautions et avertissements



N'utilisez pas **EYESTIL SYNFO** si le récipient est ouvert ou endommagé.

Pendant l'application, assurez-vous que l'extrémité du flacon n'entre pas en contact avec l'œil, les paupières ou toute autre surface.

Conserver à une température ne dépassant pas **25 °C**.

N'utilisez pas **EYESTIL SYNFO** après la date de péremption.

Ne jetez pas le produit dans l'environnement après utilisation. Pour l'élimination correcte du produit, veuillez suivre les réglementations nationales ou locales.

L'administration de **EYESTIL SYNFO** aux enfants ou aux personnes ayant des capacités limitées devrait se faire sous la surveillance d'un adulte responsable.

Interactions avec d'autres médicaments ou dispositif médical à usage ophtalmique

Les interactions des produits avec l'administration d'autres médicaments à usage ophtalmique sont inconnues. Il est donc conseillé de ne pas utiliser d'autres médicaments ou dispositifs médicaux à usage ophtalmique dans les 10 minutes qui suivent l'administration de **EYESTIL SYNFO**.

Il n'est pas nécessaire d'enlever les lentilles de contact avant l'administration de **EYESTIL SYNFO**, puisque le produit ne modifie pas les caractéristiques physiques, y compris la transparence, des lentilles de contact souples, semi-rigides et rigides les plus courantes.

Effets indésirables

L'utilisation du produit peut occasionnellement provoquer une légère brûlure ou une légère irritation. Si l'une des réactions mentionnées se produit, cessez d'utiliser ce produit.

Notification d'effets indésirables

Tout éventuel effet indésirable doit être notifié aux autorités de surveillance compétentes du pays d'utilisation ou à :

SIFI S.p.A. – Via Ercole Patti, 36 – 95025
Aci Sant'Antonio (CT) Italie
vigilance@sifigroup.com

POUR UNE UTILISATION OCULAIRE TOPIQUE UNIQUEMENT TENIR HORS DE LA VUE ET LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabricant

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) - ITALIE

EYESTIL SYNFO est un dispositif médical stérile.

CE 0426

Dernière révision du texte : décembre 2025

Les informations détaillées et mises à jour sur ce dispositif médical sont disponibles en scannant le code QR qui apparaît dans le mode d'emploi et boîte en carton avec un smartphone. Les mêmes informations sont disponibles à l'URL suivante : <http://qr.sifigroup.com/1G302760/>



Symboles – Symbols – Simbolos

	Fabricant Manufacturer Fabricante		Température maximale 25°C Upper limit of temperature 25°C Límite superior de temperatura 25°C
	Marquage CE et code de l'organisme notifié CE Mark and Notified Body Code Marcado CE y Código del Organismo Notificado		Ne pas utiliser si le récipient est endommagé Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado
	Distribué par Distributed by Distribuido por		Dispositif médical Medical device Producto sanitario
	Stérilisé en utilisant une technique aseptique Sterilized using aseptic processing technique Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento aséptico		Consultez les instructions d'utilisation Consult instructions for use Consulté las instrucciones de uso
	Numéro de lot Batch code Código de lote		QR code Código QR
	Mois et à l'année de fabrication Month and year of manufacture Fecha de fabricación		Identifiant unique du dispositif Unique device identifier Identificador único de producto
	Date de péremption AAAA-MM Use by YYYY-MM Fecha de caducidad AAAA-MM		